

PROGRAMMA 2: DEFICIT DI CONCENTRAZIONE E MEMORIA

IMPORTANTE!



Non modifichi il corso della terapia!

La sequenza deriva dalle concatenazioni energetico - dinamiche di cui questo programma tiene conto.

DURATA: 20 minuti

1. Piedi:

- **Violetto**: - 1 minuto sul dorso del piede sinistro e destro
- 1 minuto sulla pianta di entrambi i piedi

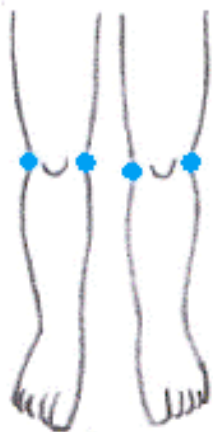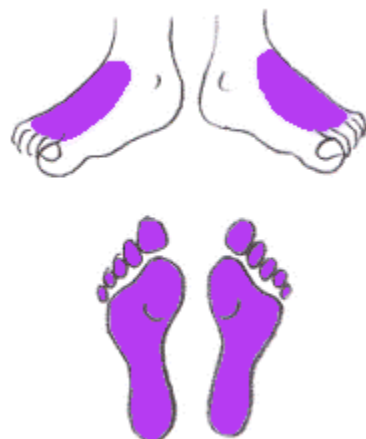

2. Ginocchia:

parte interna ed esterna

- **Blu**: - 1 minuto sulla parte interna del ginocchio sinistro e destro
- 1 minuto sulla parte esterna del ginocchio sinistro e destro

3. Ombelico:


- Verde: 1 minuto



4. Sterno:

1 palmo al di sotto della fossa giugulare
(timo)

- Blu: 1 minuto

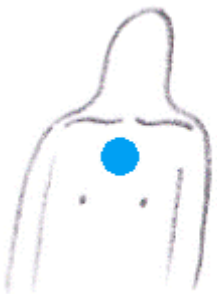

5. Collo:


parte anteriore, al di sopra della fossa giugulare
(tiroide)

- Giallo: 1 minuto



6. Zona occipitale centrale:

- Rosso: 1 minuto

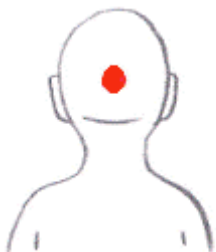

7. Testa:

- Occhi
 - Da orecchio a orecchio passando per la volta cranica
- **Arancione:** - 1 minuto sull'occhio destro chiuso
 - 1 minuto dall'orecchio sinistro al destro passando per la volta cranica
 - 1 minuto sull'occhio sinistro chiuso
 - 1 minuto dall'orecchio destro al sinistro passando per la volta cranica




RACCOMANDAZIONE TERAPEUTICA

E' importante attuare regolarmente il programma, soprattutto quando il sintomo è particolarmente acuto:

- 5 volte alla settimana, meglio 1 volta al giorno
- Durata indicativa: 4 settimane

In casi più lievi può anche essere utile un impiego sporadico o di minor durata.

Con uno spirito più fresco, potrà ottenere una maggiore capacità di concentrazione e memoria.

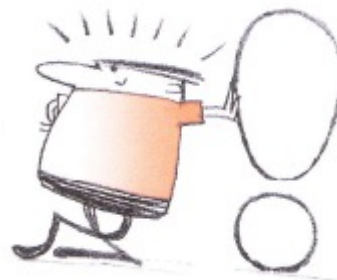

La Cromoterapia Bioptron è destinata all'autoterapia ed in caso di malattia non sostituisce il medico.